

PRODUKTBLAD

SURESCREEN ANTIGEN SALIVTEST



- ✓ Enbart Saliv
 - enkelt att använda
- ✓ Hög valideringsgrad
 - hög säkerhet
- ✓ Sensitivity: 95%
- ✓ Specificity: 99.9%
- ✓ Accuracy: 99.5%
- ✓ Tillverkas i England
 - tryggt & kort transportväg
- ✓ Levererar på myndighetsnivå till flera länder – tryggt

SureScreen Diagnostics COVID-19 Antigen snabbtest är marknadens mest kvalitativa snabbtest för analys av pågående infektion av SARS-CoV-2. Testresultatet kan utläsas redan efter 10-15 minuter.

Testet mäter virala nukleoprotein antigener från svalgsekret (spott/saliv). Testerna har marknadens högsta tillförlitlighet/valideringsgrad och bör användas inom de två första veckorna från ev. smittotillfället alt. första ev. symptom av COVID-19. Bäst resultat får man mellan dag 1-5 från smittotillfället. Förpackningen innehåller komplett kit för test.

Att arbeta med "snabbtest" ger fördelar då det är enkelt och snabbt. Man behöver inte vänta på svar utan får svar direkt (15 min).

MER OM SURESCREEN

<https://www.surescreen.com/products/COVID-19-coronavirus-antigen-test-casette>

FAKTA

Förpackningen innehåller 25 kompletta testkit.

Antal	Produkt
25	Testkassetter (Förpackad i individuella sterila påsar)
25	Svabbprover (Förpackade i individuella sterila påsar)
25	Extraktion Rör.
25	Provrör inkl. Munstycken.
1	Hållare för extraheringsrör (8 Port).
25	Flaskor med Buffer Solution.
25	Spottrattar.
25	Lock för lägre förvaring eller transport.
1	Bruksanvisning.

VIKT OCH MÅTT


Produkt	Paketerade Mått & Vikt	Tulltaxkod
Antigentest, Box innehållande 25 tester.	16,5 x 12 x 6,5 cm, 0,21 Kg NET / 17 x 13 x 7 cms, 0,24 Kg Brutto	3822000000

Tillverkningsland: UK. Produkten är CE-godkänd

HANDHAVANDE SALIVTEST

1. Ta fram produkterna. a) salivrör, b) pappersträtt, c) testkasset, samt d) buffervätska.
2. Sätt tratten i salivrör och spotta i tratten. Se till att salivet kommer från bakre regionerna i hals/mun. Harkla gärna lätt innan.
3. Ta bort tratten, sätt på pippetlocket på salivröret. Öppna buffervätskan och pressa ur hela buffervätskan i salivröret.
4. Blanda salivet och buffervätskan genom att skaka lätt, och tryck sedan på nedre delen av salivröret 10-15ggr, vänta någon minut.
5. Ta ur testkasset från förpackningen.
6. Ta sedan salivröret och vänd upp-och-ner (med pippetlocket på). Droppa sedan tre (3) droppar av salivblandningen på testkassetts droppzon. (s)
7. Vänta i 15 minuter och läs av resultatet.
8. Är du infekterad, visar testkassetten två streck, ett på (C) och ett på (T)*.
9. Är du inte infekterad, visar kassetten endast ett streck på (C).
10. Skulle något blivit fel vid testtagning, då visar testet ingenting på (C) eller (T), alt. endast streck på (T).

*Kan vara ett svagt streck på (T), det innebär bara att du har lite lägre koncentration av COVID-19 i kroppen. Du är smittat så länge kassetten visar streck svagt som kraftigt på (C) och (T)

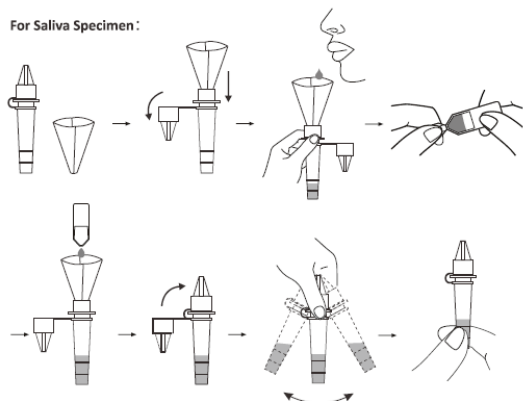

ORDFÖRKLARING

Antigentest och PCR (Viral tester) visar om man har eller "nyligen" haft COVID-19, och har högst tillförlitlighet 1-5 dagar efter smittotillfället.

PCR-tester visar virusets RNA och mäts i "lab-miljö" därav tar det längre tid att få svar.

Antigentester (kallas också snabbtester, då man får svar inom 15 minuter) "känner" av närvaron av viruset som är som starkast i början av smittotillfället. Är det test som används mest i Världen i dagsläget.

Antikroppstest visar bildade antikroppar efter genomgången COVID-19 insjuknande. Där är tillförlitligheten större 1-2 veckor efter smittotillfället.

INFORMATION OM COVID-19

COVID-19 (Corona Virus Disease) är den infektionssjukdom som orsakas av det senast upptäckta coronaviruset. Detta virus och sjukdom var okänt innan utbrottet började i Wuhan, Kina, i november/december 2019.

De vanligaste symtomen som påvisar COVID-19 är feber, trötthet, och torr hosta. Vissa patienter kan ha värk och smärta, nästäppa, rinnande näsa, halsont, diarré och uppleva smakuplöshet. Symtomen är vanligtvis milda i början och ökar gradvis.

Vissa människor blir smittade men behöver inte må dåligt eller utveckla några symtom. Runt 1 av 6 personer som får COVID-19 blir allvarligt sjuka och utvecklar andningssvårigheter. Äldre människor, och de med underliggande medicinska problem som högt blodtryck, hjärtproblem eller diabetes, är mer benägna att utveckla allvarlig sjukdom. Ca 80% återhämtar sig från sjukdomen utan att behöva särskild behandling. Ca 2% av de smittade människorna med sjukdomen COVID-19 har dött.

Att beakta: Personer med feber, hosta och andningssvårigheter bör söka läkarvård. Människor kan bli smittade av COVID-19 från andra som har viruset. Sjukdomen kan spridas från person till person genom små droppar från näsan eller munnen som sprids när en person med COVID-19 hostar eller andas ut. Dessa droppar landar på föremål och ytor runt personen. Andra människor smittas sedan av COVID-19 genom att vidröra (ta på) vid dessa föremål eller ytor, och sedan själva vidröra ögon, näsa eller mun. Idag uppskattar man inkubationstiden för COVID-19 till ungefär 1-14 dagar beroende på plats, luftfuktighet och värme/kyla.

OBSERVERA

Sekret/saliv bör användas och blandas med buffervätska så snabbt som möjligt efter att man spottat. Desto snabbare man fullföljer testet desto högre valideringsgrad erhåller man.

Om man inte utför testet direkt får saliv/buffervätska förvaras vid 2-8°C i max 24 timmar efter insamlingen av saliv/sekret.

Använd inte saliv/sekret som uppenbarligen är förorenande med blod, eftersom det ev. kan ge missvisande testresultat.

FÖRVARING SAMT HÅLLBARHET

Förvaras i rumstemperatur eller kyl (2-30°C). Förvars frostsäkert.

Använd inte produkterna efter utgångsdatumet.

Testkassetten är godkänd till utgångsdatumet tryckt på den förseglade påsen.

Testkassetten måste finnas kvar i den förseglade påsen tills den används.

Använd inte om foliepåsen har skador.

Använd inte om Buffertlösningen är missfärgad eller grumlig, detta kan vara ett tecken på mikrobiell kontaminering.